



Single use only
Seulement à usage unique
Para un solo uso
Não reutilizável

Before opening:

- check expiry date on sachet.
- spread lubrication around by rubbing packet with hands.

Open sachet: tear down from arrow at the top.

Avant d'ouvrir :

- vérifiez la date d'expiration sur le sachet
- répartissez le lubrifiant en frictionnant le sachet entre vos mains.

Pour ouvrir le sachet : déchirez-le de haut en bas à partir de la flèche.

Antes de abrir:


- Verifique la fecha de caducidad en el paquete.
- Esparza el lubricante en el interior frotando el paquete con las manos.

Para abrir el paquete: rásguelo empezando desde la flecha situada en el borde.

Antes de abrir:

- Verifique o prazo de validade na embalagem.
- Espalhe o lubrificante esfregando a embalagem com as mãos.

Para abrir a embalagem: rasgue para baixo como indicado pela seta.

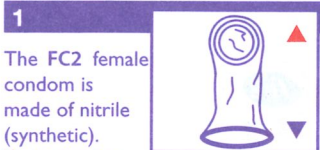

- ▲ Inner ring, used for insertion and holds condom in place.
- ▼ Outer ring, covers the external genitalia

Le préservatif féminin FC2 est fabriqué en nitrile (synthétique).


- ▲ Anneau interne pour insérer le préservatif et le maintenir en place.
- ▼ Anneau externe recouvrant les organes génitaux externes.

El condón femenino FC2 está hecho de nitrilo (sintético).

- ▲ anillo interior; se usa para insertar y mantener el condón en su sitio.
- ▼ anillo exterior; cubre los órganos sexuales externos.

O preservativo feminino FC2 é feito de nitrilo (sintético).

- ▲ argola interna, usada para a inserção e mantém o preservativo no lugar.
- ▼ argola externa, cobre a parte externa dos órgãos genitais.

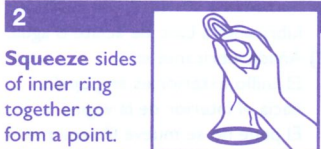

Comprimez les bords de l'anneau interne pour former une pointe.

Apriete el anillo interior por los lados hasta que se junten y formen una punta.


Comprima os lados da argola interna para formar uma ponta.



Insérez l'anneau comprimé dans le vagin.

Introduzca el anillo por la punta en la vagina.

Introduza a argola comprida na vagina.

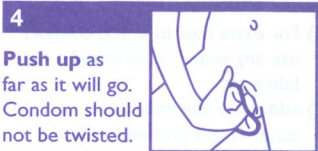


Condom should not be twisted.

Poussez le préservatif aussi haut que possible. Veillez à ce qu'il ne soit pas torsadé.

Empuje el anillo hasta donde sea posible. El condón no debe retorcerse.

Empurre o máximo possível.

O preservativo não deve ser torcido.

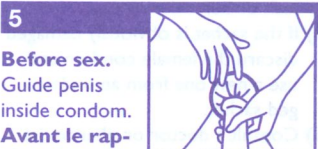

Avant le rapport sexuel. Guidez le pénis dans le préservatif.

Antes del acto sexual. Posicione el pene dentro del condón.

Antes do acto sexual. Guie o pénis para dentro do preservativo.



Retrait. Saisissez l'anneau externe, torsadez le préservatif, tirez-le du vagin.

Para retirarlo. Agarre el anillo exterior y retuézalo. Después, saque el condón.

Remoção. Aperte e torça a argola externa. Retire.



Jetez-le à la poubelle.

Échelo al basurero.

Puxe e jogueno lixo.