



Single use only  
A usage unique seulement  
Para un solo uso

## HINTS

- 1) For extra moisture and comfort use any water or oil based lubricant
- 2) add extra lubricant if:
  - outer ring is pushed inside
  - penis sticks
  - you hear noise during sex
- 3) Be careful of sharp nails and jewellery to avoid tearing the condom

## CONSEILS

- 1) Pour plus de confort, utiliser des lubrifiants à base d'eau ou d'huile
- 2) Ajouter du lubrifiant si:
  - La bague extérieure est poussée à l'intérieur du vagin
  - Le pénis ne glisse pas bien
  - On entend des bruits pendant les rapports sexuels

## CONSEJOS

- 1) para obtener una mayor humedad y comodidad usar con cualquier lubricante a base de aceite o agua
- 2) añadir lubricante si:
  - el aro externo penetra al interior de la vagina
  - el pene queda atascado
  - se escucha ruido durante el acto sexual

Manufactured by:


The Female Health Company  
Chicago IL / London W3 0BZ, UK  
December 2010  
www.femalehealth.com

1

Rub condom to spread lubricant.

Frotter le préservatif pour bien répartir le lubrifiant

Frotar el preservativo para esparcir el lubricante.

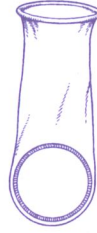

2

HOLD RING  
Squeeze Ring.

MAINTENIR  
LA BAGUE  
et la pincer.

SOSTENER EL ARO.  
Apretar el Aro.



3

INSERT  
Insert as far as it will go.

INTRODUIRE le préservatif aussi loin que possible.

INTRODUCIR.  
Introducir lo más posible.



4

PUSH UP  
Condom should not be twisted.

POUSSER VERS LE HAUT.  
Veiller à ce que le préservatif ne soit pas tordu.

EMPUJAR HACIA ARRIBA.  
El preservativo no debe retorcerse.



5

DURING  
SEX  
Guide penis inside condom

PENDANT LES RAPPORTS  
SEXUELS, guider le pénis à l'intérieur du préservatif.

DURANTE EL ACTO  
SEXUAL. Guiar al pene dentro del preservativo.



6

REMOVAL  
Squeeze and twist outer ring, pull out and discard in wastebin.

DEPOSE.  
Pincer la bague extérieure en la faisant tourner. Déposer le préservatif et le jeter dans une poubelle.

PARA RETIRARLO  
Apretar y retorcer el aro externo, jalar del mismo y echar al basurero.



CE 0088  
G0039